

Instructie voor plaatsing Afinion 2 CRP meter t.b.v. ZNB locaties

Datum: maart 2020

I.v.m. Corona richtlijnen is het niet mogelijk dat het POCT-team installatie ter plekke zelf uitvoert.

Daarom hierbij aanwijzingen om de installatie door de gebruiker te laten doen.

1. geschikte plek

220 V aanwezig

Stevige, vlakke tafel (niet een karretje of tafel op wielen i.v.m. kwetsbare optiek)

Koelkast in nabijheid t.b.v. voorraad cartridges; werkvoorraad mag op kamertemp

2. plaatsing van de meter

laat de meter minimaal een half uur op kamertemp komen voor ingebruikname

sluit de meter aan op 220V

zet de meter aan, er volgt een zelf test van circa 2 min.

3. Controle metingen uitvoeren

Neem "controle 1", draai dop af en plaats op tafel

laat een druppel vloeistof in de holte van de dop vallen

voer een meting uit op de aangegeven wijze (zie handleiding)

Noteer het resultaat

Idem voor "controle 2"

4. Meter vrijgeven

Bel/mail de resultaten van controle 1 en 2 door naar het POCT team

Na beoordeling en goedkeuring door het POCT kan de meter vrijgegeven worden

Plak het meegeleverde label met "vrijgegeven t/m xxxx" op de analyzer

De CRP meter mag nu gebruikt worden door medewerkers die instructie hebben gehad

Succes met de installatie en de metingen!



POCT-team Certe KCL Leeuwarden. Tel 058-2863794; poct-mcl@certe.nl